

## 【検査手順】



1 血を出しやすくするために指先をマッサージします。



2 アルコールパッドで指先を拭いてください。




3 薬指の腹の端に採血針を押し付けます。針は一度しか出せませんのでご注意ください



4 最初に出てきた血をアルコールパッドで拭き取り、指先から米粒程度の血を絞り出します。



5 スポイトを用いて、血を吸い取ります。

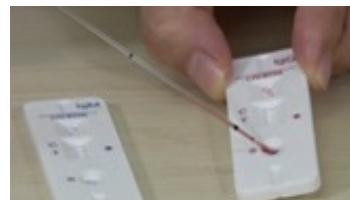

6 採取した血をIgG検体キットの検体穴へ2～3滴垂らします。



7 希釈液をIgG検体キットの検体穴へ2～3滴垂らします。



8 採取した血をIgM検体キットの検体穴へ2～3滴垂らします。



9 希釈液をIgM検体キットの検体穴へ2～3滴垂らします。

以上で検査完了です。  
結果が出るまで15分程お待ちください。