

【検査手順】



1 血を出しやすくするために指先をマッサージします。



2 アルコールパッドで指先を拭いてください。



3 薬指の腹の端に採血針を押し付けます。針は一度しか出せませんのでご注意ください



4 最初に出てきた血をアルコールパッドで拭き取り、指先から米粒程度の血を絞り出します。



5 スポイトを用いて、血を吸い取ります。



6 採取した血を検体希釈液へ入れます。



7 蓋を閉め振り混ぜます。



8 血と希釈液を混ぜたものをスポイトで採取します。



9 採取したものをキットの検体穴へ2～3滴垂らします。

以上で検査完了です。
結果が出るまで15分程お待ちください。